



Canin



Bovin



Équin

Vision artificielle pour l'analyse de sperme

Système portable et précis pour évaluer la qualité de semence du mâle reproducteur



Précision

Analyse précise et objective de:

- ✓ Concentration.
- ✓ Motilité.
- ✓ Motilité progressive.

Rapidité

- ✓ Résultats immédiats.
- ✓ Accélère l'évaluation de la semence.
- ✓ Facilite la prise de décisions clés.

Connectivité

- ✓ Connexion en temps réel via Bluetooth.
- ✓ Sur n'importe quel appareil.
- ✓ Conserve les vidéos et exporte les résultats.

Qu'est-ce qu'Anavia?

C'est un **dispositif portable** pour évaluer les doses avant l'insémination et ainsi améliorer le taux de réussite de l'insémination. Il dispose d'un **système de chauffage** pour la manipulation correcte des échantillons.

Grâce à la **connectivité Bluetooth**, Anavia est contrôlé par une application mobile **intégrant un algorithme d'analyse haute précision**, ce qui fournit des résultats rapides et précis sur la qualité du sperme. Enfin, il **permet d'exporter les rapports** de chaque analyse au format PDF ou Excel depuis votre smartphone.



Vision artificielle pour l'analyse de sperme

Portable et léger

Son design compact et léger est idéal pour les professionnels nécessitant de la mobilité sans sacrifier la qualité des résultats.


Branché sur secteur, sans batteries

Anavia fonctionne connecté au secteur avec un seul câble. Fonctionne sans dépendance aux batteries pour être toujours opérationnel.

Données précises, connectivité totale et contrôle thermique intégré

Chauffé

Grille et plateau chauffés.

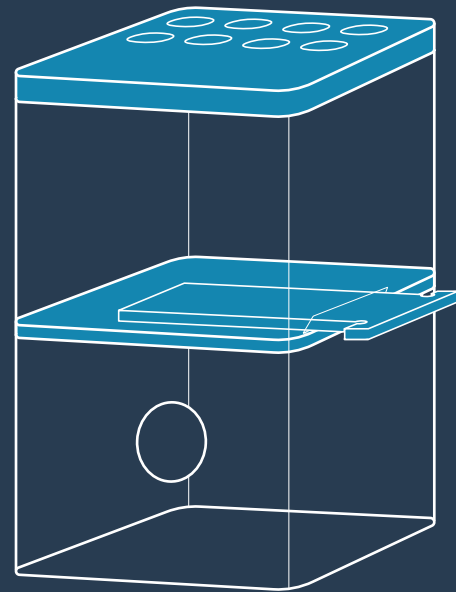

Comment l'utiliser?



Connectez-vous à l'application

Téléchargez l'app, saisissez vos identifiants et connectez-vous via Bluetooth.



Allumez l'appareil

Branchez-le, appuyez sur le bouton et attendez que la lumière soit verte.



Préparer l'échantillon

Charger l'échantillon tempéré dans la chambre de comptage.



Analyser

Lancez l'analyse et attendez les résultats dans l'application.



Générer des rapports

Visualisez les résultats et exportez les rapports en PDF ou Excel.